

## DeltaVen® gesloten katheter

Gebruiksaanwijzing voor subcutane toegang

### VOOR HET GEBRUIK


1. Lees de instructies voor gebruik. Handel steeds volgens uw ziekenhuis- of organisatiebeleid.
2. Kies de correcte kathetermaat: Aanbevolen maten en lengtes voor subcutaan gebruik zijn 26 G, 24 G & 22 G met een katheterlengte van 19 mm.
3. Maak de aanprikplaats klaar en behandel huid antiseptisch volgens het beleid en de procedure van het ziekenhuis.
4. Draag handschoenen.
5. Controleer de vervaldatum en of de verpakking intact is. Open de primaire verpakking volgens de aanwijzingen (PEEL). Niet gebruiken indien de individuele verpakking beschadigd is, geopend, of indien het product zijn vervaldatum heeft bereikt. Het product moet onmiddellijk worden gebruikt nadat de verpakking is geopend.
6. Controleer of de aansluitingen en/of toebehoren vast zitten.
7. Controleer of de klem op de extensielijn in de "open" positie staat.

### SUBCUTAAN GEBRUIK


- 1** Maak de DeltaVen® klaar door het dopje en de luchtfilter weg te nemen.




- 2** Maak de naald los – trek terug tot halfgeweg de katheter.

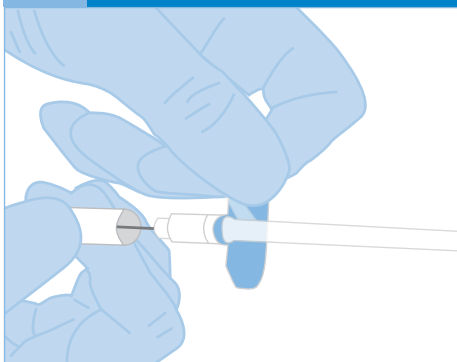


- 3** Verbind de infuusset of spuit.

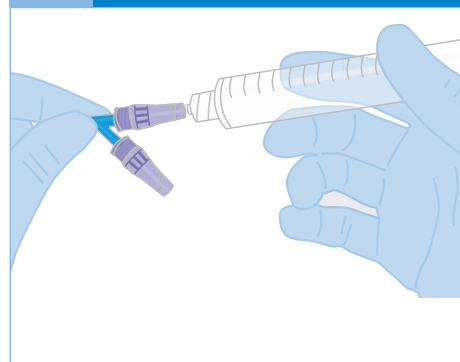


- 4** Vul het lumen van de DeltaVen® door gebruik te maken van het toedieningssysteem en houd de vloeistof in het oog, breng dan de naald opnieuw volledig in - controleer of de naaldpunt volledig zichtbaar is aan het uiteinde van de katheter.

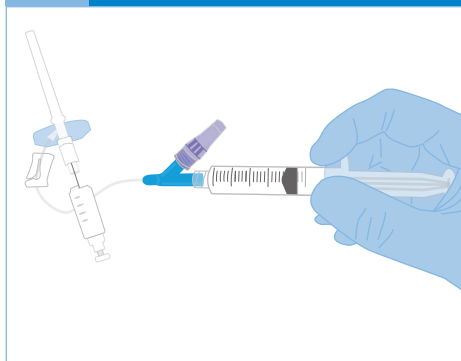

- 5** Verwijder de huls met een draaibeweging, terwijl u het gekleurde deel vasthoudt. Inspecteer de katheter.

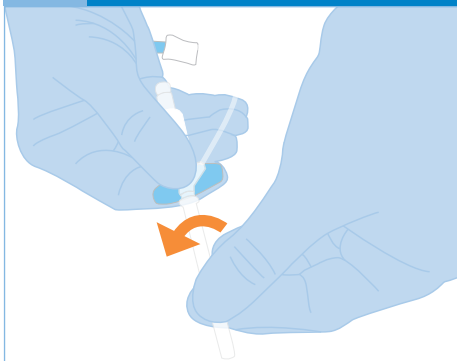


- 6** Grijp met een hand het witte deel van DeltaVen vast en knijp met de andere hand zacht de huid tussen duim en wijsvinger om de subcutane huidlaag te lokaliseren.

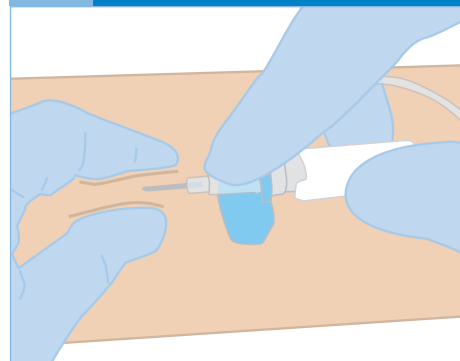

Na de naald opnieuw te hebben ingebracht, controleer of de naaldpunt niet werd beschadigd en volledig uit het distale deel van de katheter komt. Vervang het product indien dit niet het geval is.

7

Houd het hulpmiddel vast op de geribbelde buitenkant, en breng de katheter in een geschikte hoek in. Houd de geribbelde buitenkant vast en trek de naald terug tot het veiligheidssysteem volledig geactiveerd is, aangegeven door een hoorbare "klik".

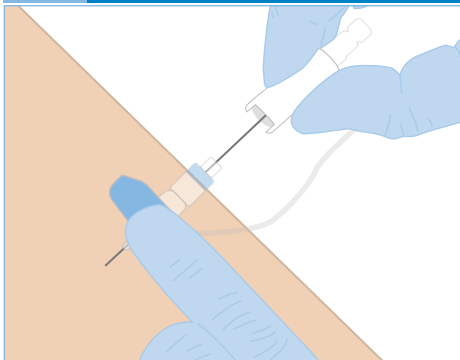


De naald moet in een continue beweging worden verwijderd, in een rechte lijn met de katheter.

Gooi de naald in een geschikte naaldencontainer.

8

Plak de katheter af volgens intern protocol. Start de toediening.

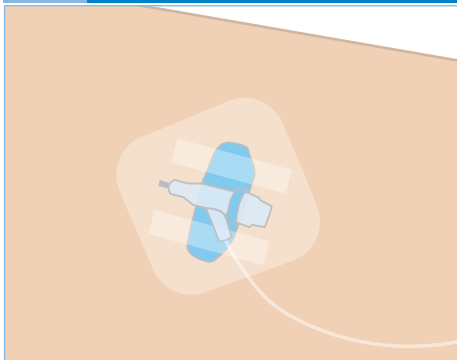

## ONDERHOUD

1. Blijf de infuus/site controleren volgens het intern beleid.
2. Wij bevelen aan om DeltaVen® te gebruiken volgens de lokale protocollen en CDC-richtlijnen.
3. Vervang een naaldloze connector binnen maximaal 7 dagen of nadat de aansluiting 200 keer is gebruikt.
4. Als het hulpmiddel van een kraantje is voorzien, is het raadzaam dit na 72 uur te vervangen, of na 24 uur bij gebruik van geconcentreerde glucose- of lipidenoplossingen of bloedproducten.

Bezoek onze website voor meer informatie: [www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

IN CANADA EN ANDERE LANDEN ZIJN DE BESCHREVEN PRODUCTEN MOGELIJK NIET TOEGELATEN OF BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP

#### Distributie:

**Smiths Medical Nederland B.V.**  
Jagersbosstraat 28  
5241 JT Rosmalen  
Tel: +31 (0)73 528 50 50  
Email : [nederland@smiths-medical.com](mailto:nederland@smiths-medical.com)  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

**Smiths Medical Belgium N.V.**  
Pegasuslaan 5  
1831 Diegem  
Tel.: +32 (0)2 704 49 00  
E-mail: [belgium@smiths-medical.com](mailto:belgium@smiths-medical.com)

**Vervaardigd door:**  
**Delta Med SpA**  
Via G. Rossa, 20  
46019 Viadana (Mn) - Italy  
Tel.: +39 0375 785915

MMSPCA-0081

CE  
0123

smiths medical

Ga voor de contactgegevens van uw plaatselijke vertegenwoordiger naar [www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us](http://www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us)

Smiths Medical is een onderdeel van het wereldwijde technologiebedrijf Smiths Group plc. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding voor een volledige opsomming van de indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Het logo van Smiths Medical is een handelsmerk van Smiths Medical. Het symbool © geeft aan dat het handelsmerk is geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en in bepaalde andere landen. Alle andere genoemde namen en merken zijn handelsmerken of dienstmerken van hun respectieve eigenaren. De betreffende producten zijn CE-gemarkeerd. ©2018 Smiths Medical. Alle rechten voorbehouden. SS195492NL-022018