

BD Venflon™ Pro Safety

Praktijktips



- Pas uw gebruikelijke greep toe en verwijder het hoesje van de naald.
- Benader de vene onder lage hoek.
- Zodra bloed verschijnt, verklein de insteekhoek tot bijna evenwijdig met de huid.



- Schuif de katheter lichtjes op, 2 tot 3 mm, om zeker te zijn dat de kathetertip in de vene zit.
- U kan overwegen de katheter te stabiliseren door één van de vleugels vast te houden.
- Trek de naald 2 tot 3 mm terug.



- De tweede bloedreflux tussen de naald en de katheter bevestigt correcte plaatsing van de katheter in de vene.
- Schuif de katheter geheel op in de vene.
- Verwijder de stuwband.



- Stabiliseer de katheter door één vleugel vast te houden.
- Druk met de wijs-of middelvinger de vene aan de kathetertip af en houd de naald bij de naaldgreep vast terwijl u hem terugtrekt.



- Neem de naald **niet** bij het veiligheidsmechanisme vast.



- Werp de naald in een naaldencontainer.