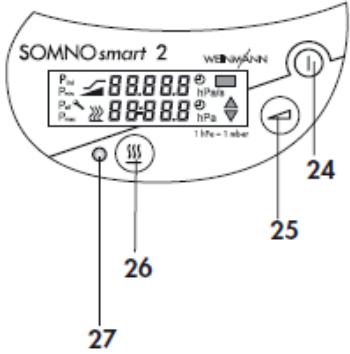


Urenstand uitlezen op Weinmann Somnosmart 2 (WM 24900)

<p>Stap 1:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Door het apparaat in te schakelen wordt telkens gedurende enkele seconden de totale therapieduur weergegeven. 	
<p>Stap 2:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Houd bij het uitschakelen van het apparaat de in-/uitschakeltoets 24 zolang ingedrukt tot de totale therapieduur (onderste regel) en de therapieduur per dag (bovenste regel) in het display verschijnen. • Noteer de totale urenstand op de antwoordkaart en stuur deze retour naar Mediq Tefa. 	
<p>Stap 3:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer er 5 seconden lang geen toets wordt bediend, verschijnt gedurende 2 seconden de gebruiksduur (bovenste regel). Daarna verdwijnt de weergave en staat er weer "0" in het display. • Het apparaat kan nu weer uitgeschakeld worden. 	