


# INSTRUCTIEKAART

## Aansluiten van de nieuwe Sondevoedingfles



### 1 Voorbereiding

Om passage van de voeding te bevorderen adviseren wij in een halfzittende positie te voeden en deze positie tot een half uur na het voeden aan te houden.

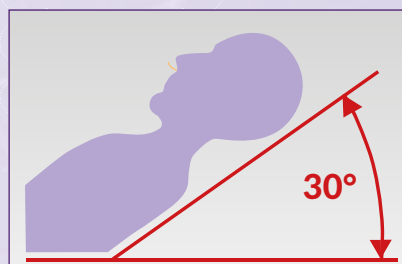

### 2

1. Verzamel alle benodigdheden (fles sondevoeding, Flocare toedieningsysteem, pomp etc.)
2. Maak de werkplek schoon
3. Was de handen met zeep en droog ze af met een schone handdoek



### 3

Verwijder de verpakking van het toedieningsstelsel.




### 4

Verwijder het kapje van de plus connector.



Zorg dat plusvormige connector onder het kapje niet met de vingers wordt aangeraakt om besmetting te voorkomen.

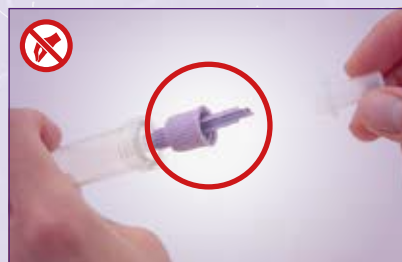

**5** Open de flip-top dop.



Zorg dat de plusvormige poort niet met de vingers wordt aangeraakt om besmetting te voorkomen.



**6** Zet de fles rechtop om het toedieningssysteem met de fles te kunnen verbinden. De plusvormige connector(+) op het toedieningssysteem dient verbonden te worden met de plusvormige poort(+) op de fles.



**7** Het is belangrijk om eerst het toedieningssysteem door de seal heen te duwen voordat het systeem wordt vastgedraaid.



**8** De fles is nu aangesloten en er kan gevoed worden volgens de normale werkwijze.

